

LeEject 2® 牙科注射器和針頭系統

簡介

LeEject 2 注射器和針頭系統是用於減少當前技術裝新蓋和擰開階段的牙科器械。這項新技術需要學習過程，因此請訪問網站 www.LeEject.com 觀看指導視訊。

使用說明

LeEject 注射器和針頭用於牙科手術前或在牙科手術過程中的滲透和神經塊麻醉的局部麻醉藥筒。

警告

1. 請勿施加過大的力或彎曲針頭，這樣可能導致針頭斷裂。
2. 請勿用手拾取掉落的針頭；請使用牙科鉗或止血鉗拾取。
3. 請勿將打開蓋的針頭交給其他牙科人員以避免針頭刺傷風險。

預防措施

1. LeEject 2 注射器必須和 LeEject 針頭一起使用。
2. 建議使用具有大開口的利器容器，如Covidien的Sharps-A-Gator(型號31144010)或BD的Wallmate，方便收集針頭。必須在每個治療區域放一個利器容器。
3. **對同一患者多次注射可以使用同一針頭，但注射後應盡快丟棄用過的針頭。如果以後需要再次注射，請使用新針頭。**
4. 如果密封破損，則針頭失去滅菌效果，不得使用。
5. 如果塑料防護帽破損，必須更換。

清潔/滅菌說明

1. 注射器出售時未滅菌，使用前必須進行滅菌處理。
2. 每個程序結束時，應在超聲波容器中徹底清潔注射器，去除所有血液、唾液和麻醉劑痕跡。
3. 清潔後，在符合批准國家/國際標準的高壓釜中對注射器進行滅菌處理。按照高壓釜指導原則進行正確滅菌處理。
4. 將注射器存放在乾燥滅菌區域。

操作說明

請觀看網站上的指導視訊，www.LeEject.com。

插入 LeEject 針頭

1. 防護帽是唯一的塑料部件，用於固定針頭。旋轉防護帽，對齊錐形插座區域。
2. 擰開短防護蓋，露出錐形區域，將針頭錐形部分放在注射器中。
3. 順時針旋轉防護帽，固定針頭。
4. 注射前取下長蓋。

插入麻醉藥筒

拉動柱塞時，將麻醉藥筒放入注射器針筒。

手動抽取

按下指環，使叉部連接針筒的橡膠柱塞。注射前始抽取，緩慢注射。

取下藥筒

快速拉動指環，將叉部與藥筒脫離。推動藥筒經過下方小窗口。用另一只手的拇指和食指撿起藥筒。如果需要另一個藥筒，將另一個藥筒放入注射器中。



處理針頭

1. 取下針頭前拔下藥筒。
2. 逆時針旋轉防護帽，露出針頭錐形部分，注射器頭向下，使針頭直接落入下方的利器容器內。
3. 或者，將針頭放在牙科托盤上。用牙科鉗或止血鉗拾取針頭，立刻丟到利器容器中。保持工作區域安全乾淨。


用戶協助信息：

聯繫 Advanced Technology & Capital, Inc., 5 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 電子郵件 info@LeEject.com 或電話 +1 201 803 5202。


LeEject 2® Syringe Instructions

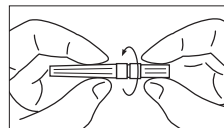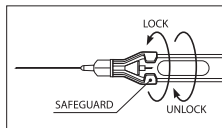


1. Twist off the protective cap.

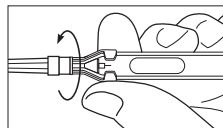

2. Place the needle into the syringe and rotate the plastic Safeguard counter clockwise.

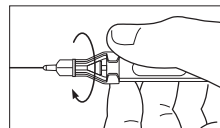

3. After use, remove cartridge and turn over Safeguard clockwise.

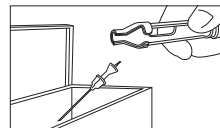

4. Position syringe and invert it so that needle falls into sharps container.



LeEject 2® Syringe & Needle
Dental Safety Device